

Otinova öronspray

Förpackning och hållbarhet

20 ml öronsprayflaska innehållande 15 ml lösning (150 sprayningar). Hållbarhet i rumstemperatur: 3 år från tillverkning (se datum på förpackning och flaska), öppnad flaska 6 månader.

Distribueras i Sverige av Oriola, artikelnummer: 820685

GTIN-13: 7392130925104

Referenser

Lämnas på begäran av ABIGO Medical AB

Webbsida

www.otinova.se

Indikation

Behandling och profylax av hörselgångsinflammation (extern otit, eksem, s.k. simmaröra).

Produktbeskrivning

Otinova® öronspray är en välbeprövad och vetenskapligt/kliniskt dokumenterad egenvårdsprodukt som effektivt och säkert förebygger och behandlar hörselgångsinflammation.

Otinova® är registrerad hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt, klass 1, för indikationen behandling och profylax av extern otit (MDD 93/42/EEC).

Otinova® säljs receptfritt på apotek.

Innehåll och verkningsmekanism

Otinova® innehåller aluminiumacetat och aluminiumacetotartrat (1,8% aluminium), ättiksyra, vatten, pH 3–4 (Burows lösning).

Otinova® innehåller inte antibiotika eller steroider. Otinova® verkar lokalt uttorkande, är klådstillande och har en bakterie- och svampdödande effekt.

Dosering och användning

Otinova® sprayas 1-2 ggr i hörselgången i örat, morgon och kväll. Kan användas av både barn (>5 år) och vuxna. Det är viktigt att luta huvudet efter sprayning så att vätskan når längst in i hörselgången. Torka bort överflödigt vätska. Använd inte Otinova® utan uppehåll under längre tid än 7 dagar.



ABIGO Medical AB

Ekonomivägan 5, 436 33 ASKIM, Sweden

Tel: 031-748 49 50

abigo.se • pharma@abigo.se